

ThermoSplint

Reinigungs-/ Pflegehinweise



Diese Schiene wurde individuell für Sie hergestellt und soll höchsten Tragekomfort sicherstellen. Tragen Sie Ihre Schiene wie von Ihrem Zahnarzt beschrieben und pflegen Sie Ihre Zähne auch weiterhin durch Putzen und die Anwendung von Zahnseide. Sollte Ihre Schiene drücken oder anderweitige Beschwerden hervorrufen, wenden Sie sich zur Nachsorge bitte an Ihren Zahnarzt.

1. TÄGLICHE REINIGUNG

Wir empfehlen, Ihre Schiene täglich vor und nach jedem Tragen zu reinigen. Entfernen Sie Speichel und Rückstände von der Schiene unmittelbar nach dem Herausnehmen mit warmem Wasser und etwas Seife.

2. VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL

Für die regelmäßige Entfernung von Rückständen und die Reinigung Ihrer Schiene können Sie schonende Reinigungsmittel verwenden, die speziell für die Reinigung von Dentalvorrichtungen angeboten werden. Bei Bedarf können Sie außerdem einen weichen Borstenpinsel nutzen, um die Innenseiten Ihrer Schiene von Rückständen zu befreien. Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsübliche Prothesenreiniger verwenden. Zu den geeigneten Reinigungsmitteln zählen Seife (flüssig) und alkoholfreie Reiniger für Dentalvorrichtungen.

3. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lassen Sie Ihre Schiene NIE LÄNGER als 1 Stunde in einer Reinigungsflüssigkeit
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel mit Schleifkörpern (z. B. Zahnpasta), da dies die Lebensdauer Ihrer Schiene beeinträchtigen könnte.
- Spülen Sie die Schiene vor jedem Tragen gründlich ab.
- Um eine Bruchgefahr zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, Ihre Schiene vor jedem Tragen für mindestens 20 Sekunden in ca. 50°C warmes Wasser zu legen
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schiene völlig trocken ist, bevor Sie sie in der Schale lagern. Nur so können Sie der Bakterienbildung vorbeugen.